



WipeClean Ethanol Disinfection 80%

Desinfektionsklud



Engangsklude til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol.

Anvendelsesområde

Beregnet til overfladedesinfektion af rene, mindre overflader, der tåler alkohol. Ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

Effektiv mod bl.a. M. norovirus. PT2 og PT4 biocidprodukt til professionel brug. Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under J.nr.: 2015-29-7105-00105. Produktet virker baktericidt og fungicidt. Der er givet dispensation for efterskyl med vand.

Velegnet til brug på hospitaler, plejecentre, hjemmeplejen, klinikker, tandlæger, dyrlæger, restauranter, køkkener, kontormiljøer samt i biler og andre transportmidler.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Engangsklude til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder 80% denatureret ethanol (denatureret med IPA). Uparfumeret. Godkendt til brug i fødevarer virksomheder uden efterskyl med vand.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, klar til brug.

WipeClean Ethanol Disinfection 80% findes i følgende størrelser:

5252 Mini: 20 x 20 cm. rækker til 0,5 m²

5211 Small: 20 x 30 cm. der rækker til 1 m²

5212 Large: 30 x 40 cm. der rækker til 2,5 m²

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal og virucidal effekt. Produktet er derfor bl.a. virksomt mod Coronavirus, M. norovirus og Adenovirus.

Vurderet af CEI til Intermediate level desinfektion.

Godkendt af Fødevarestyrelsen J.nr: 2015-29-7105-00105.

Brugsanvisning

Kludene er klar til brug og skal anvendes på rengjorte og tørre overflader. Benyt personlige værnemidler i henhold til lokale arbejdsinstruktioner. Brug en klud til at desinficere, hold kluden fladt og tør overfladen af i S-form, så hele overfladen er våd. Brug en ny klud hvis kluden bliver snavset eller tør. Ved synligt snavsede overflader rengøres overfladen inden desinfektion. Må ikke anvendes på overflader, der er følsomme overfor alkohol. Lad overfladen tørre naturligt i overensstemmelse med den angivne kontakttid. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Genbrug ikke en klud. Luk altid emballagen efter brug.

Ikke beregnet til håndhygiejne.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN16615	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13727	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13697	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min
EN13697	Fungicidal Effect	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13624	Fungicidal Effect	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13624	Yeasticidal Effect	C. albicans	1 min
EN16615	Yeasticidal Effect	C. albicans	1 min
EN14348	Tuberculocidal/Mycobactericidal Effect	M. terrae M. avium	1 min
EN14476	Virucidal Effect	Adenovirus M. norovirus	1 min

Indhold

Ingrediens	Effekt
Denatureret ethanol	80% Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, 30 dage fra åbning.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

STORBRITANNIEN

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)****Forpakning**

12 x 20 stk

5212

5701684521229

5701684521212

Wipes

20 x 25 stk

5211

5701684521120

5701684521113

Wipes

12 x 100 stk

5252

5701684525227

5701684525210

Wipes

**Standard tilbehør**

WipeClean Ethanol
Disinfection 80% Mini

4114 Væggholder til WipeClean Mini

WipeClean Ethanol
Disinfection 80% Small

4112 Væggholder til WipeClean Small

WipeClean Ethanol
Disinfection 80% Large

4113 Væggholder til WipeClean Large

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.