

Oxivir[®] Excel[™] Foam CE

Bredspektret rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse hårde overflader

Beskrivelse

Diversey Care Oxivir Excel Foam CE er et klar-til-brug ét trins rengørings- og desinfektionsmiddel med bredspektret effektivitet og korte kontakttider. Produktet er baseret på Diversey Care's patenterede Accelereret Hydrogenperoxid formulering. Kan anvendes på ikke-invasivt medicinsk udstyr, hårde ikke-porøse overflader og på flere bløde møbler/boligtekstiler.

Egenskaber

- Baktericidal, Virucidal, Gærdræbende
- Desinficerer på blot 1 minut
- Positiv sikkerhedsprofil for brugere og overflader
- Effektivt rengøringsmiddel
- Parfumefri
- Det aktive indhold nedbrydes til vand og ilt
- Ingen efterskylning nødvendig

Fordele

- Den brede effekt sikrer de højeste niveauer af patientbeskyttelse. Omfattende testet efter europæiske normer og effektivt overfor en lang række patogener. Har fuld virucidal effekt, herunder overfor *Poliovirus*, *Adenovirus* og *Murine norovirus*. Vurderet som effektiv overfor alle kappebærende vira som *HIV*, *HBV*, *HCV*, *Influenza*, *Vacciniavirus* og *Coronavirus*.
- Korte kontakttider hvor overfladen holdes våd, så desinfektionsmidlets effekt sikres
- Fremragende rengøringssevne, herunder afkalkning og kalkbegrænsning, hvilket fjerner behov for et forudgående rengøringstrin
- Fremragende sikkerhedsprofil for brugere, som reducerer arbejdsrisiko, uden faremærker, indeholder ikke respiratoriske irritationsfremkaldere
- AHP-formuleringen er skånsom på overflader, hvilket forlænger udstyrets levetid
- Velegnet til brug i højrisikoområder i sundhedssektoren, herunder operationsstuer, intensivafdelinger, neonatalafdelinger og patientværelser.

Brugsanvisning



Applikation

Skumrengøring og desinfektion:

1. Fjern grov snavs.
2. Anvend på overflader enten ved applikation med forvædet klud eller anvend direkte på overfladen ved brug af bruseflasken.
3. Aftør eller lad det lufttørre efter kontakttiden *.

Vigtigt: Må ikke blandes med andre produkter. Må ikke anvendes på overflader, som er følsomme overfor vand eller syre.

* Sørg for at overfladen forbliver våd under hele kontakttiden

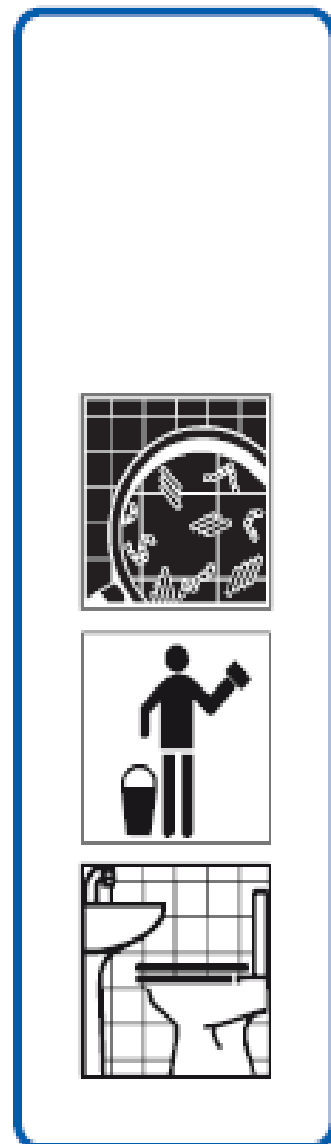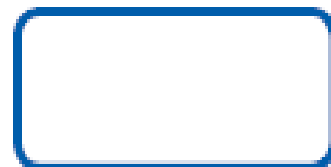

Oxivir[®] Excel[™] Foam CE

Bredspektret rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse hårde overflader

Tekniske data

Udseende:	Klar farveløs væske
Relativ vægtfylde [20° C]:	1,000
pH-værdi i brug:	1,95
Holdbarhed:	720 dage
Duft:	neutral

Ovennævnte data er baserede på normal produktion, må ikke anvendes som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

For fuld information om håndtering og bortskaffelse af dette produkt henvises til separat sikkerhedsblad. Opbevares tillukket i den originale flaske. Undgå ekstreme temperaturer. Reagerer med oxiderbare stoffer.

Øvrige forhold

Ved anvendelse som anbefalet kan Oxivir Excel Foam anvendes på de fleste, almindeligt forekommende overflader.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer

Mikrobiologisk information

Effektivitet testet i overensstemmelse med: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476.

Claim		Kontaktid
<i>Bactericidal</i>	RTU	5 min
<i>Yeasticidal</i>	RTU	5 min
<i>Virucidal</i>	RTU	30 sek

Emballagestørrelser

Varenummer	Forpakning	Type
100941432	6 x 0.75 L	Bruseflaske m. skumdyse