



DiverseyTM

Oxivir Plus Spray

Effektivt rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasivt medicinsk udstyr, og ikke-porøse overflader

Beskrivelse

Oxivir Plus er et kraftigt bredspektrret rengørings- og desinfektionsmiddel med fremragende egenskaber, som virker mod bakterier, vira og skimmelsvamp. Formuleringen er baseret på innovativ accelereret hydrogenperoxid (AHP) teknologi, som effektivt nedbryder patogener som MRSA, Hepatitis C og Norovirus. 750 ml i en klar-til-brug fortynding. Flasken indeholder en for-fortyndet formulering i rette koncentration til at virke effektivt mod bakterier, skimmelsvamp, gær og vira.

Egenskaber

- Rengøring og desinfektion i en arbejdsgang
- Bredspektrret effekt: Baktericidal, Virucidal, Gærdræbende
- Effektivt rengøringsmiddel
- Uden parfume
- Aktivstoffet nedbrydes til ilt og vand.
- Baseret på patenteret accelereret hydrogenperoxid (AHP) teknologi.

Fordele

- Fremragende rengøringsresultater, stribefri optørring, minimerer kalkaflejring.
- AHP-formuleringen er skånsom på overflader, hvilket forlænger udstyrets levetid.
- Kan anvendes i områder med fødevarekontakt.
- Velegnet til brug i højrisikoområder i sundhedssektoren, herunder operationsstuer, intensivafdelinger, neonatalafdelinger og patientværelser
- God sikkerhedsprofil for brugeren.
- Kan anvendes til hårde overflader, der tåler vand samt visse tekstiloverflader.
- Testet iht. europæiske normer (EN-test) som bredspektrret desinfektion overfor bakterier, vira, gær og svampe.

Brugsanvisning




En arbejdsgang ved bakterier, svampe og vira, undtagen Norovirus*

Sprayrengøring og desinfektion:

1. Fjern alt synligt snavs
2. Sprøjt på overfladen
3. Tør af med en ren klud forvædet med Oxivir Plus
4. Sprøjt på igen og lad Oxivir Plus virke den ønskede tid i forhold til anvendelsen.
5. Tør derefter af.

Vigtigt!

1. Brug ikke varmt vand.
2. Bland ikke med andre produkter.
3. Anvend ikke på vand- eller syrefølsomme overflader.

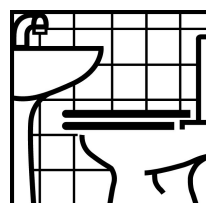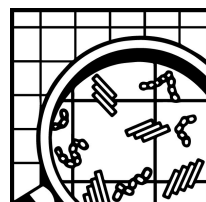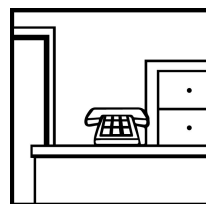

© A.I.S.E



Oxivir Plus Spray

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): < 2

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Mikrobiologiske data

Kontaktid i forhold til anvendelse:

Baktericidal: 5 minutter

Fungicidal: 15 minutter

Virucidal*: 5 minutter

Tuberculocidal: 30 minutter

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
100829234	DI Oxivir Plus Spray 6x0.75L W4086	Klar-til-brug

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 19/04/2022 da-DK (K00240)